


Total Etch™

La référence pour le mordantage total



Gel d'acide phosphorique à 37% pour le mordantage et le conditionnement simultanés de l'émail et de la dentine, dans le cadre de procédures de collage des restaurations adhésives : composites, scellement des sillons, inlays/onlays esthétiques...

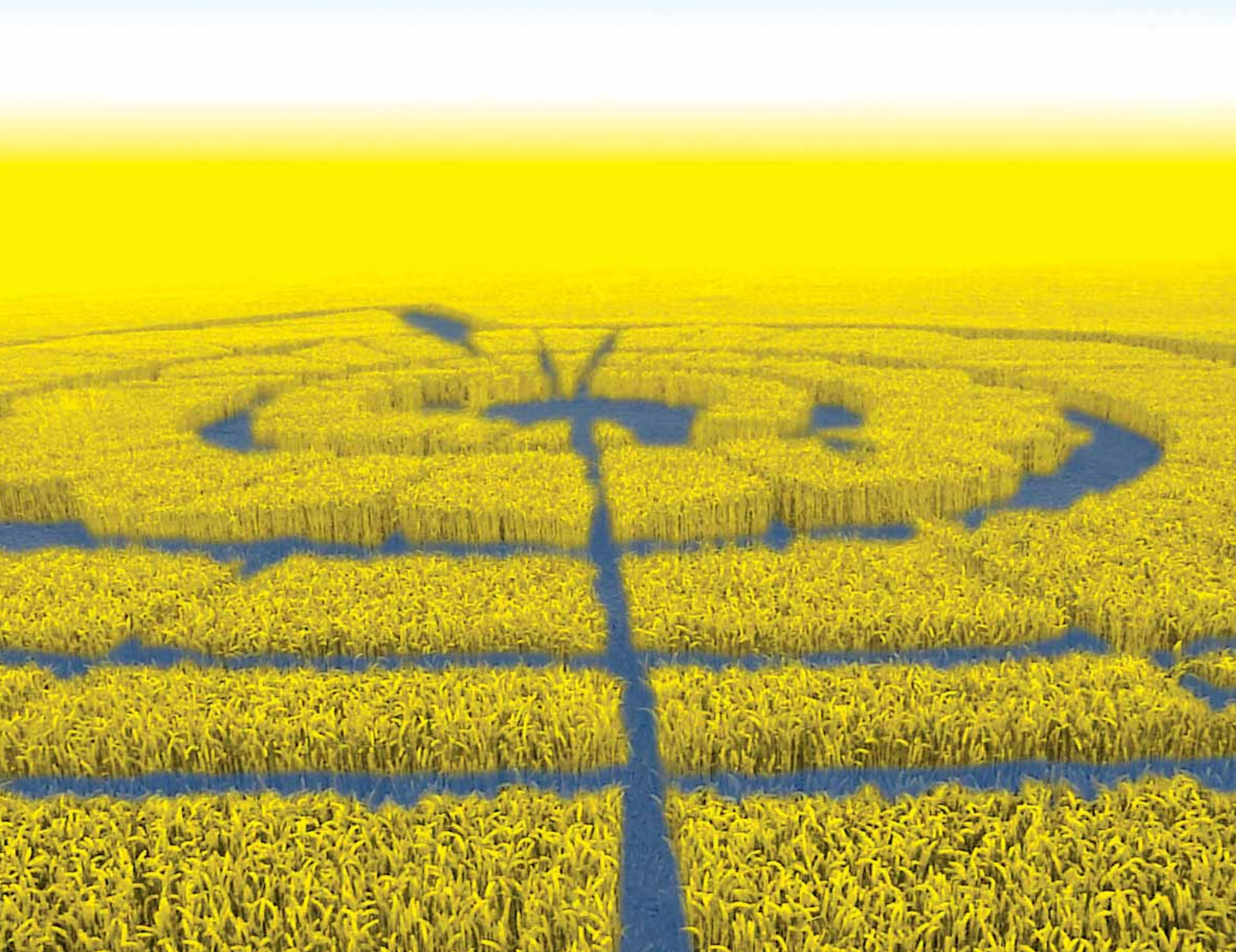

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Précision totale

La canule en métal, courbée à 45°, permet une **application précise** de Total Etch, même dans les zones difficiles à atteindre. La **rapidité** et la **sécurité** de l'adaptation de la canule sur la seringue sont assurées par le système Luer-Lock.

Total Etch possède un **haut pouvoir mouillant**. Sa fluidité est adaptée, pour un bon étalement, sans écoulement excessif.



Économie totale

100% du gel est utilisé. Le piston de la seringue assure un écoulement lent et constant du gel jusqu'à l'expulsion totale, sans perte de produit.

Le nouveau repose-doigt octogonal assure une meilleure préhension de la seringue pour un dosage plus précis.



Efficacité totale

L'acide phosphorique à 37% assure le meilleur mordantage de l'émail. Son application durant 15 secondes sur la dentine permettra une parfaite pénétration de l'adhésif utilisé dans la procédure de collage.

Total Etch s'élimine totalement au rinçage. La procédure de mordantage total avec

Total Etch est la référence qui garantit l'étanchéité et la durabilité de tous vos collages.



Total Etch s'applique d'abord sur l'émail. Sa couleur contraste avec celle de la dent. Parce qu'il ne coule pas, le gel s'applique facilement là où on veut sur l'émail, sans déborder sur la dentine.



Dans un deuxième temps, Total Etch est appliqué aussi sur la dentine.



Une fois mordancé, rincé et séché, l'émail a un aspect blanc crayeux, ce qui permet de vérifier le résultat du mordantage.

Le conditionnement économique

Total Etch Jumbo 30 grammes !

Économique

Facile à utiliser :

1/ Visser la seringue vide sur Total Etch Jumbo

2/ Activer le piston pour remplir la seringue

Sécurisant :

→ quantité toujours disponible

→ pas de sur-remplissage de la seringue grâce à l'arrêt de sécurité

Assortiment Total Etch Jumbo

1 seringue Total Etch Jumbo 30 g

2 seringues Total Etch 2 g

10 canules en métal

Référence 558530




Refill Total Etch

2 Seringues Total Etch 2 g

10 canules en métal

Référence 550588

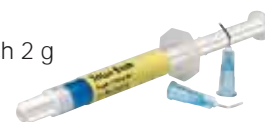

Canules d'application Total Etch

20 canules en métal

Référence 550587



Totalement économique

Ce matériau a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire. Il doit être mis en œuvre conformément au mode d'emploi. Les descriptions et les données fournies ne sont pas contractuelles et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. Imprimé en France
© Ivoclar Vivadent SAS, France

www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent SAS Clinical

BP 118 | 74410 Saint-Jorioz | France | Tél. : 04 50 88 64 00 | Fax : 04 50 68 91 52

ivoclar
vivadent
passion vision innovation